

PRECAUCIONES

La ley federal de EE. UU. restringe la venta y el uso a un médico o por orden de este.

La esterilización gamma se realiza en las bolsas CleanTouch. Nunca abra la bolsa de CleanTouch hasta justo antes de usarla. No utilice el producto CleanTouch si la bolsa exterior está rota. El efecto de esterilización puede debilitarse y el producto puede quedar no estéril.

ADVERTENCIAS

Este producto está diseñado para un solo uso. No reutilizar. La reutilización dará como resultado un rendimiento subóptimo del material de PVA y puede contaminar el campo quirúrgico.

Si la fecha de vencimiento ha pasado, no lo use. El uso después de la fecha de vencimiento puede resultar en un rendimiento subóptimo del material de PVA y el producto puede dejar de ser estéril.

© 2020 Copyright MED-LOGICS®, Inc.
Reservados todos los derechos.

P/N: 900-3571-001



ML100
Clean-Compressed PVA Eye Spears



PRECAUCIONES

La ley federal de EE. UU. restringe la venta y el uso a un médico o por orden de este.

La esterilización gamma se realiza en las bolsas CleanTouch. Nunca abra la bolsa de CleanTouch hasta justo antes de usarla. No utilice el producto CleanTouch si la bolsa exterior está rota. El efecto de esterilización puede debilitarse y el producto puede quedar no estéril.

ADVERTENCIAS

Este producto está diseñado para un solo uso. No reutilizar. La reutilización dará como resultado un rendimiento subóptimo del material de PVA y puede contaminar el campo quirúrgico.

Si la fecha de vencimiento ha pasado, no lo use. El uso después de la fecha de vencimiento puede resultar en un rendimiento subóptimo del material de PVA y el producto puede dejar de ser estéril.

© 2020 Copyright MED-LOGICS®, Inc.
Reservados todos los derechos.

P/N: 900-3571-001



ML100
Clean-Compressed PVA Eye Spears



Descripción del producto

Las lanzas oculares CleanTouch PVA son dispositivos estériles de un solo uso diseñados para absorber el exceso de líquido en el ojo humano.



MED-LOGICS, Inc.®

1627 Enterprise Street, Athens, TX 75751 USA

Tel: +1-949-582-3891/ Correo electrónico: info@mlogics.com



European Representative

E C Rep Ltd,

5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland

Tel: +353-89 225-1951/ Correo electrónico: info@ecrep.ie



UK Representative

Responsible Person Ltd,

Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edinburgh, EH6 7BD, UK

Tel: +44-7543-672-888/ Correo electrónico: [info@responsible-](mailto:info@responsible-person.co.uk)

Person.co.uk

Instrucciones de uso

1. Retire las bolsas de aluminio de la bolsa estéril.
2. Retire los tallos de la bolsa de aluminio.
3. Introduzca material de PVA en cualquier exceso de líquido. El material PVA absorberá líquido hasta alcanzar su capacidad.
4. Una vez que una lanza alcance su capacidad, deséchela y use una lanza nueva.

Condiciones de almacenaje

Las lanzas para ojos CleanTouch PVA no tienen condiciones especiales de almacenamiento, pero deben almacenarse en condiciones normales de almacén, que incluyen protección contra la humedad, el frío extremo (menos de 5 °C) y el calor excesivo (más de 40 °C).

Símbolos utilizados en el etiquetado



Numero de catalogo



Numero de lote



Fabricante



Representante autorizado en la UE



Representante autorizado en el Reino Unido



Marcado CE y Nº Rep. Autorizado.



Consultar Instrucciones de Uso



Precaución



No reutilizar



No utilizar si el paquete está dañado.



Esterilizado con óxido de etileno



Para uso por, o por orden de, un médico



Fecha de Fabricación: (AAAA-MM)



Utilizar por: (AAAA-MM)



Dispositivo médico



Identificador único de dispositivo

Descripción del producto

Las lanzas oculares CleanTouch PVA son dispositivos estériles de un solo uso diseñados para absorber el exceso de líquido en el ojo humano.



MED-LOGICS, Inc.®

1627 Enterprise Street, Athens, TX 75751 USA

Tel: +1-949-582-3891/Correo electrónico: info@mlogics.com



European Representative

E C Rep Ltd,

5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland

Tel: +353-89 225-1951/ Correo electrónico: info@ecrep.ie



UK Representative

Responsible Person Ltd,

Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edinburgh, EH6 7BD, UK

Tel: +44-7543-672-888/ Correo electrónico: [\[Person.co.uk\]\(http://Person.co.uk\)](mailto:info@responsible-</p></div><div data-bbox=)

Instrucciones de uso

1. Retire las bolsas de aluminio de la bolsa estéril.
2. Retire los tallos de la bolsa de aluminio.
3. Introduzca material de PVA en cualquier exceso de líquido. El material PVA absorberá líquido hasta alcanzar su capacidad.
4. Once Una vez que una lanza alcance su capacidad, deséchela y use una lanza nueva.

Condiciones de almacenaje

Las lanzas para ojos CleanTouch PVA no tienen condiciones especiales de almacenamiento, pero deben almacenarse en condiciones normales de almacén, que incluyen protección contra la humedad, el frío extremo (menos de 5 °C) y el calor excesivo (más de 40 °C).

Símbolos utilizados en el etiquetado



Numero de catalogo



Numero de lote



Fabricante



Representante autorizado en la UE



Representante autorizado en el Reino Unido



Marcado CE y Nº Rep. Autorizado.



Consultar Instrucciones de Uso



Precaución



No reutilizar



No utilizar si el paquete está dañado.



Esterilizado con óxido de etileno



Para uso por, o por orden de, un médico



Fecha de Fabricación: (AAAA-MM)



Utilizar por: (AAAA-MM)



Dispositivo médico



Identificador único de dispositivo